



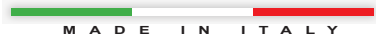

MASQUE CHIRURGICAL JETABLE TYPE II

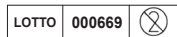

Le dispositif médical TYPE II FRANCE MASQUE est notifié à la banque de données du Ministère de la Santé avec RDM 1984056



MASQUE CHIRURGICAL JETABLE TYPE II

Composition: trois couches : 2 plis TNT 100% polypropylène voile n° 1 Melt Blown pouvoir filtrant BFE 2 98% - degré de contamination (biocharge) S 30 ufc / g - pression différentielle eau ou un gel désinfectant.

Taille des enfants: 14,5x9,5 cm

Utilisation conforme: TYPE II FRANCE MASQUE est un dispositif médical jetable non stérile adapté la bouche, le nez et le menton de l'utilisateur assurant ainsi une barrière qui limite la transmission d'agents infectieux entre le personnel médical et le patient

Normes appliquées UNI EN 14683: 2019 - ISO 10993-1: 2010

Classification du produit: Masque facial de type II à usage médical (UNI EN 14683: 2019)

INSTRUCTIONS:

1. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool avant de mettre le masque facial.
2. Mettez le masque en le saisissant par les élastiques latéraux.
3. Lorsque vous couvrez la bouche et le nez, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le visage et le masque afin qu'il s'adapte parfaitement au visage.
4. Évitez de toucher le masque pendant l'utilisation et remplacez-le par un neuf dès qu'il est mouillé.
5. Retirez le cadre des bords latéraux sans toucher l'avant.
6. Immédiatement après le jeter dans un récipient approprié.
7. Lavez-vous immédiatement les mains avec du savon et de l'eau ou un gel désinfectant.

Entretien: il n'a pas besoin comme produit jetable

MASQUE CHIRURGICAL JETABLE TYPE II



INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION :

Avant de mettre le masque, il est recommandé de se laver les mains

1. Accrochez les élastiques derrière les oreilles
2. Mettez le masque en le plaçant d'abord sur le nez.
3. Façonnez le renfleur en le faisant adhérer aux contours. Appuyez légèrement pour obtenir le meilleur ajustement possible sur les joues et sous le menton.

Retirer le masque en évitant tout contact avec la partie interne



IMPORTATEUR:

France Masque 55 rue sadi Carnot 93700 Drancy

Tel : 06.51.78.73.21 Email: contact@France-masque.fr

Fabricant: di yu meiluan via traversa di maiano prato italy

