

Masque Facial

MICROFIBRE

(LAVABLE ET RÉUTILISABLE)



LAVABLE



TAILLE UNIQUE



CONFORTABLE



ANTIBACTERIEN

IMPORTÉ PAR :
VOIN HOLLAND B.V.
Waldorpstraat 00393
2521CJ 'S-Gravenhage
Netherlands
med@voin.nl
www.voinmed.com



www.voinmed.com



Masque Facial

MICROFIBRE

(LAVABLE ET RÉUTILISABLE)



LAVABLE



TAILLE UNIQUE



CONFORTABLE



ANTIBACTERIEN



NOTICE D'UTILISATION

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes



Laver vous les mains



Prenez le masque par le haut



Placer le masque sur le visage puis l'attacher



Régler le masque sur la racine du nez



Abaisser le masque sous le menton

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Vous pouvez laver votre masque à chaque fois que vous le jugez nécessaire.

Pour stériliser votre masque, remplir un récipient avec un demi-litre d'eau puis verser de l'eau à 30° sur le masque en s'assurant que l'eau entre bien en contact avec chaque pointe du masque.

Laissez votre masque dans l'eau pendant au moins une minute puis laissez-le sécher afin d'éliminer l'excédent d'eau.

Ce masque a été testé pour 15 lavages. Après 15 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

IMPORTÉ PAR :

VOIN HOLLAND B.V.
Waldorpstraat 00393
2521CJ 'S-Gravenhage
Netherlands
med@voin.nl
www.voinmed.com



www.voinmed.com

